

EGESIO

Prevención en sus manos



MANUAL DE USO Brazaletes Inteligente T5

El Brazaletes Inteligente T5 es un dispositivo que se enlaza con la App EGESIO (Disponible para Android e iOS), es parte de la Plataforma Integral de Salud EGESIO, que permite el monitoreo de sus signos vitales en tiempo real y ayuda con la prevención de posibles complicaciones en la salud, además de brindarle funciones útiles en la vida diaria.

Preparación



Cargue el Brazaletes Inteligente durante 2 a 2.5 horas antes de encenderlo por primera vez. Debe introducir el punto de carga en un puerto USB de su computadora o cubo de carga de celular. El símbolo Batería será visible en la pantalla mientras carga.



Al finalizar la carga, coloque los extensibles como muestra la ilustración.



Notas:

- El Brazaletes Inteligente debe ser cargado en una fuente regulada como una laptop o un regulador.
- Si el Brazaletes Inteligente está inactivo, deberá cargar la batería cada 3 meses.

¿Cómo medir la Temperatura corporal?

Una vez encendido el Brazaletes Inteligente, la pantalla inicial mostrará la medición de su temperatura corporal.



Deslice su dedo sobre el botón único para visualizar el resto de mediciones:

🌡️ temperatura, 🩺 oxigenación, 🩺 presión arterial, 🫀 ritmo cardiaco, entre otros.

Cuando la pantalla muestre el parámetro que desea medir, mantenga su dedo sobre el botón único durante 5 segundos; percibirá una ligera vibración y el ícono de la pantalla comenzará a moverse y esto, significa que el Brazaletes Inteligente ha iniciado la medición. Al transcurrir de 15 a 60 segundos, conforme al tipo de medición, la imagen dejará de moverse y percibirá otra ligera vibración, antes de visualizar los resultados.

Funciones

Modo de hora: medición de temperatura corporal, tiempo de reposo, pasos, visualización de la batería restante, fecha y hora (si no se configuró en el brazaletes inteligente, se sincronizarán después de conectarse el dispositivo). Mantenga presionado para cambiar la interfaz.

Podómetro: registro automático de los pasos de manera diaria

Calorías: registro automático del consumo de calorías diarias

Distancia: registro automático de la distancia recorrida a pie diariamente

Frecuencia cardíaca: medición de la frecuencia cardíaca por hora o manualmente. Mantenga presionado para ingresar a la interfaz de medición de frecuencia cardíaca.

Presión arterial: medición de la presión arterial cada hora o manualmente. Mantenga presionado para ingresar a la interfaz de medición de la presión arterial.

Oxígeno en sangre: medición del oxígeno en sangre por hora o manualmente. Mantenga presionado para ingresar a la interfaz de medición de oxígeno en sangre.

Inmunidad: medición automática de la inmunidad actual por hora con la aplicación.

Sueño: medición automática de la calidad del sueño de manera diaria.

Recordatorio inteligente: Activación de notificaciones en la APP. El brazaletes inteligente le notificará cuando haya nuevos mensajes y llamadas entrantes.

Modo de entrenamiento: mantenga presionada la interfaz del modo de entrenamiento para ingresar. Los modos de carrera, alpinismo y ciclismo están integrados.

Clima: condición climática en tiempo real, se sincronizará con los datos de su dispositivo y se mostrará en la interfaz de visualización de la hora.

RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR LAS MEDICIONES

El brazaletes inteligente T5 cuenta con sensores que realizan mediciones constantes bajo condiciones de movimiento y vida diaria.

Es importante recordar que el dispositivo nunca reemplazará a una medición realizada por un profesional de la salud, ni sustituye una consulta médica; funciona como aproximación para alertar de manera oportuna alguna complicación en su salud. Consulte a su médico.

Sin embargo, para mejorar la precisión de las lecturas es importante seguir las siguientes recomendaciones:


Coloque el Brazaletes Inteligente sobre su muñeca, sin que se haya untado crema recientemente o su piel se encuentre mojada, asegúrese de que los sensores estén limpios y se encuentren en contacto firme contra su piel. Al abrochar los extensibles, procure que no queden de manera apretada o suelta.




Tome en cuenta que la **temperatura corporal** puede verse afectada por:



Para obtener mayor precisión en la medición de su **presión arterial**, debe realizarla en posición sentada, coloque el Brazaletes Inteligente en su brazo izquierdo, mantengalo estirado y procure que esté a la misma altura del corazón.

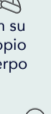

Al enlazar su Brazaletes Inteligente con la App EGESIO, hace posible monitorear sus mediciones y alertar de manera oportuna riesgos de salud a través de la centralización y análisis de datos. El seguimiento es personalizado con fines de prevención y para mejorar su calidad de vida.

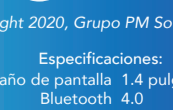

Copyright 2020, Grupo PM Soluciones

Especificaciones:

Tamaño de pantalla	1.4 pulgadas
Bluetooth	4.0
Nivel impermeable	IP67
Tipo de Batería	Batería de polímero
Capacidad de la batería	90mAh
Tiempo de carga	2 - 2.5 horas
Tamaño del brazaletes (muñeca)	251 mm * 18 mm * 2.5 mm
Método de carga	Micro USB

Este producto contiene una batería de polímero. No exponga este producto a entornos con altas temperaturas durante mucho tiempo. No coloque este producto cerca de flamas.

La operación de este equipo es sujeta a las siguientes dos condiciones: 1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquéllas que pudieran ocasionar su operación no prevista.