

EGESIO

Prevención en sus manos



MANUAL DE USO Brazalete Inteligente T8

El Brazalete Inteligente T8 es un dispositivo que se enlaza con la App EGESIO (Disponible para Android e iOS), es parte de la Plataforma Integral de Salud EGESIO, que permite el monitoreo de sus signos vitales en tiempo real y ayuda con la prevención de posibles complicaciones en la salud, además de brindarle funciones útiles en la vida diaria.

PREPARACIÓN

Para cargar la batería de su Brazalete Inteligente, inserte el punto de carga en un puerto USB de una fuente que regule la corriente, como puede ser una computadora, televisor o consola de videojuegos.

El clip asegura el contacto entre las puntas metálicas y el punto de carga del Brazalete Inteligente. Si la carga se está haciendo de manera correcta, en la pantalla aparecerá el símbolo de una batería aumentando el nivel de carga.

La primera vez que se carga se recomienda hacerlo de manera ininterrumpida por 2.5 a 3 horas, de esa manera cuidará la vida útil de la batería.

Notas:

- Es importante evitar cargar el Brazalete Inteligente directamente del tomacorriente, ya que un pico de corriente puede bloquearlo por varios días o incluso dañarlo, por lo que se debe cargar de una fuente regulada.
- Si el Brazalete Inteligente está inactivo, deberá cargar la batería cada 3 meses.

INSTALACIÓN DE EXTENSIBLES

Inserte una aguja del extensible en una de las perforaciones de su Brazalete Inteligente, presione hacia abajo la otra aguja y alínela con la otra perforación, suelte la aguja y verifique que se haya ensartado correctamente.

Una vez realizada la carga y la instalación de extensibles, coloque el Brazalete Inteligente; deje un dedo de separación sobre su muñeca y asegúrese de que los sensores se encuentren en contacto firme contra su piel, sin estar demasiado apretado; de lo contrario, las mediciones NO serán exactas.

Para iniciar el Brazalete Inteligente, presione por tres segundos la pantalla.

Para ver y controlar todas las funciones de su brazalete inteligente, deslice su dedo hacia los lados, arriba y abajo, y dé un ligero toque a la pantalla para seleccionar una función.

FUNCIONES

Pantalla inicial / Temperatura y hora. La hora y fecha de su Brazalete Inteligente se sincronizarán de manera automática cuando realice el enlace con la App Egesio desde su teléfono celular, aún cuando viaje y haya cambio de horario.

Esta función cuenta con tres opciones de pantalla inicial: temperatura corporal, temperatura ambiente y hora / fecha. Deslice su dedo hacia los lados para ver la que desee.

Se recomienda elegir **Temperatura corporal** como pantalla de inicio para tener conciencia del monitoreo constante a su salud, verifique no estar confundiendo con temperatura ambiente.

Deslice su dedo hacia arriba y abajo para ver el menú de funciones:



Frecuencia cardíaca (HEART): Toque el ícono del corazón del menú principal para ingresar a la interfaz de frecuencia cardíaca y toque nuevamente para comenzar la medición.

Presión arterial (BLOOD): Toque el ícono de barómetro del menú principal para ingresar a la interfaz de presión arterial y toque nuevamente para comenzar la medición.

Oxigenación en sangre (SPO2): Toque el ícono de sangre (gota) del menú principal para ingresar a la interfaz de oxigenación en sangre y toque nuevamente para comenzar la medición.

Inmunidad (Immunity): Toque el ícono de inmunidad (molécula) del menú principal para ingresar a la interfaz de inmunidad y toque nuevamente para comenzar la medición (a mayor actividad física, mayor porcentaje).

Modo de entrenamiento (TRAINING): Toque el ícono de entrenamiento (persona corriendo) del menú principal para ingresar al submenú de entrenamiento, deslice su dedo para ver las ocho opciones y toque nuevamente para seleccionar la de su preferencia, al ingresar; debe dar un toque en la pantalla para iniciar la medición.

Recordatorio inteligente (Message): Activación de notificaciones en la App Egesio. El brazalete inteligente le notificará cuando haya nuevos mensajes y llamadas entrantes.

Cronómetro (TIMER): Toque el ícono de cronómetro del menú principal para ingresar a esta interfaz y toque nuevamente para comenzar, pausar y parar la medición.

Ajustes (TIMER): Esta sección incluye: modo silencio (MUTE), brillo de pantalla (BRIGHTNESS), estilo (SWITCH STYLE), reseteo (RESET), Apagado (POWER OFF).

Dirección MAC o Mac Address: Para conocer el identificador único asignado a su Brazalete Inteligente, presione la pantalla inicial de manera prolongada hasta que se visualice.

El Brazalete Inteligente T8 cuenta con sensores que realizan mediciones constantes bajo condiciones de movimiento y vida diaria. Es importante recordar que el dispositivo nunca reemplazará a una medición realizada por un profesional de la salud, ni sustituye una consulta médica; funciona como aproximación para alertar de manera oportuna alguna complicación en su salud. Consulte a su médico.

Sin embargo, para mejorar la precisión de las lecturas es importante seguir las siguientes recomendaciones:

Coloque el Brazalete Inteligente sobre su muñeca, sin que haya untado crema recientemente o su piel se encuentre mojada, asegúrese de que los sensores estén limpios y se encuentren en contacto firme contra su piel. Al abrochar los extensibles, procure que no queden de manera apretada o suelta.

Tome en cuenta que la **temperatura corporal** puede verse afectada por:

Para mejorar las lecturas de **Oxigenación y Ritmo cardíaco** es necesario considerar que las mediciones se pueden afectar por la reciente presencia de:


Para obtener mayor precisión en la medición de su **presión arterial**, debe realizarla en posición sentada, coloque el Brazalete Inteligente en su brazo izquierdo, manténgalo estirado y procure que esté a la misma altura del corazón.

Al enlazar su Brazalete Inteligente con la App Egesio se hace posible el registro histórico de las mediciones de sus signos vitales y monitoreo, mediante algoritmos programados que permiten alertar de manera oportuna riesgos de salud.

Egesio permite un seguimiento personalizado constante y enfocado en el cuidado preventivo de salud, lo que beneficia la calidad de vida.

Este producto contiene una batería de polímero. No exponga este producto a entornos con altas temperaturas durante mucho tiempo. No coloque este producto cerca de flamas.

La operación de este equipo es sujeta a las siguientes condiciones: 1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquellas que pudieran ocasionar su operación no prevista.

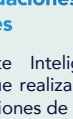

Grupo PM Soluciones

Copyright 2020, Grupo PM Soluciones

Especificaciones:

Tamaño de pantalla 1.3inch 240*240-TFT

Bluetooth 4.0

Nivel impermeable IP67

Capacidad de la batería 170mAh

Tiempo de carga 3-5 días

Tipo de Botón Full touch

Método de carga Clip de Carga

Características técnicas.

Modulación digital

Banda de frecuencia 2 401.15 MHz - 2 480.90 MHz;

Densidad espectral de potencia del transmisor -13.69 dBm/3kHz;

Potencia pico máximo de salida 0.000 974 W;

Ancho de banda de RF a 6 dB 717.80 kHz y 729.40 kHz;

Atenuación de las emisiones no esenciales 30.21 dB;

Emisiones no esenciales radiadas < 75 nW.

Exposición prolongada al sol

ambiente muy frío

capas de ropa o cobertores

con su propio cuerpo

todo tipo de ejercicio

aguantar la respiración

actividad física de trabajo

altitud

temor, ansiedad y estrés

posición sentada

brazo izquierdo

manténgalo estirado

esté a la misma altura del corazón.